



OneTouch Reveal® Mobiele app

Compatibel met OneTouch® bloedglucosemeters

Configuratie met Android of iOS

1



DOWNLOAD
de OneTouch Reveal®
[app gratis*](#)

2



ONTDEK
de OneTouch Reveal®
[mobiele app*](#)

ONETOUCH®



* Instructievideo's

Voor meer informatie, en vooreerst het product te gebruiken, gelieve de handleiding en de bijsluiters die met uw systeem meegeleverd worden zorgvuldig te lezen.



De OneTouch Reveal® mobiele app helpt u om uw diabetes gemakkelijker te managen



Synchroniseer uw digitaal logboek

In het digitale logboek worden uw glycemieresultaten van uw bloedglucosemeter automatisch gesynchroniseerd en georganiseerd om u te helpen bij het dagelijkse management van uw diabetes.



Uw vooruitgang volgen

Het wordt gemakkelijker om trends in uw glycemiewaarden te begrijpen dankzij de visuele voorstellingen en gepersonaliseerde herinneringen en notificaties. Volg de aanbevelingen van uw zorgverlener om actie te ondernemen.



Uw data gemakkelijk delen met uw zorgteam

Deel uw glycemieresultaten en vooruitgang met uw zorgteam (na uw akkoord) om uw medische zorg te verbeteren.*



* met uw akkoord en na uw toestemming, zijn verschillende mogelijkheden om uw resultaten en rapporten met uw professionele zorgverlener te delen beschikbaar



De app installeren en configureren op een Android smartphone

STAP 1

Download de OneTouch Reveal® mobiele app




Hebt u een smartphone met iOS?
Ga dan naar pagina 10 voor de configuratie.

A




Tik op het Google Play icon op uw Android smartphone


B

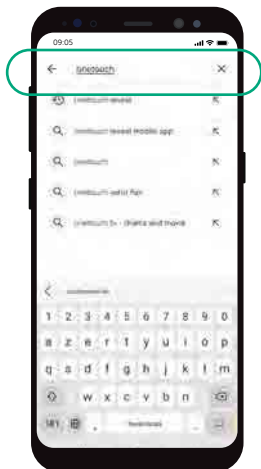


C

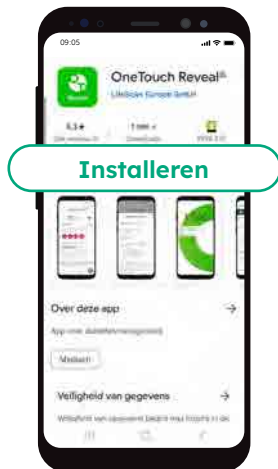

D

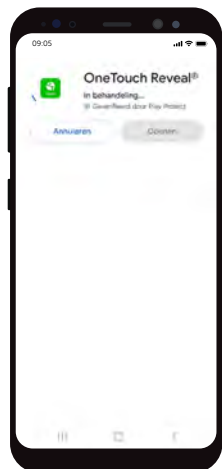


E

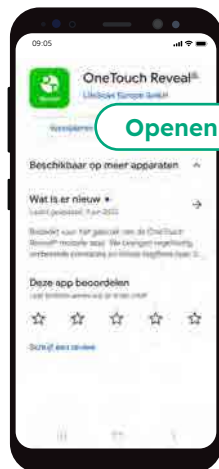




STAP 2

Een OneTouch Reveal account creëren, en de verplichte informatie aanvullen :

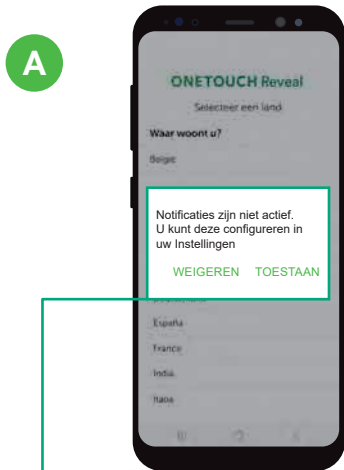


U bent vrij om te accepteren of te weigeren, maar om het meeste uit de app te halen, raden we aan om de optie “**TOESTAAN**” te selecteren. De app zal u nu notificaties kunnen sturen.

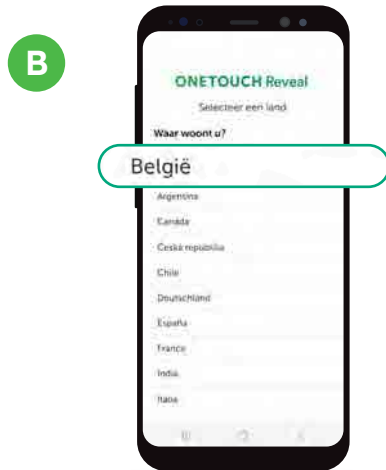

Kies “**België**” als uw land



De “**Toestemming voor de verwerking van persoonlijke/ gevoelige gegevens**” aanvaarden

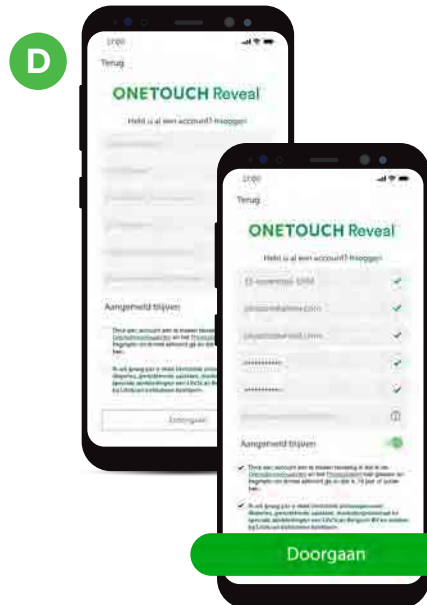



STAP 3

Uw OneTouch® meter met de OneTouch Reveal® app connecteren via Bluetooth

i BELANGRIJK

Zorg ervoor dat de Bluetooth® functie geactiveerd is zowel op de meter als uw smartphone





Bluetooth® activeren op uw meter


Voor de OneTouch Reflect® meters:

- Zet de meter aan door “OK” ingedrukt te houden
- Ga naar het menu “Instellingen” en kies Bluetooth®
- Selecteer “Aan” en duw op “OK”
- Ga terug naar het beginscherm met de knop ↶
- Het symbool  is nu zichtbaar op het scherm van uw meter in de rechterbovenhoek

Voor de OneTouch Select Plus Flex® meter

- Zet de meter aan door “OK” ingedrukt te houden
- Houd de knoppen “OK” en ^ ingedrukt
- Het  symbool is zichtbaar op het meterscherm

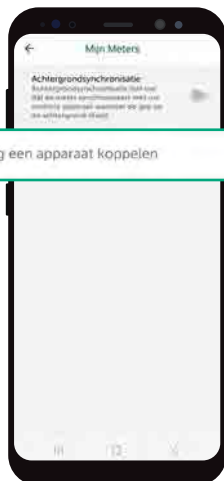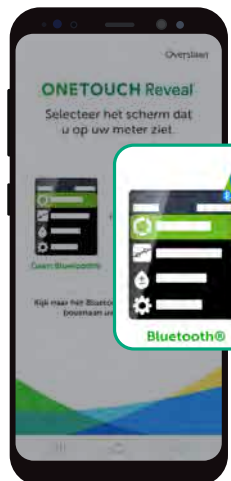A**B****C****D**

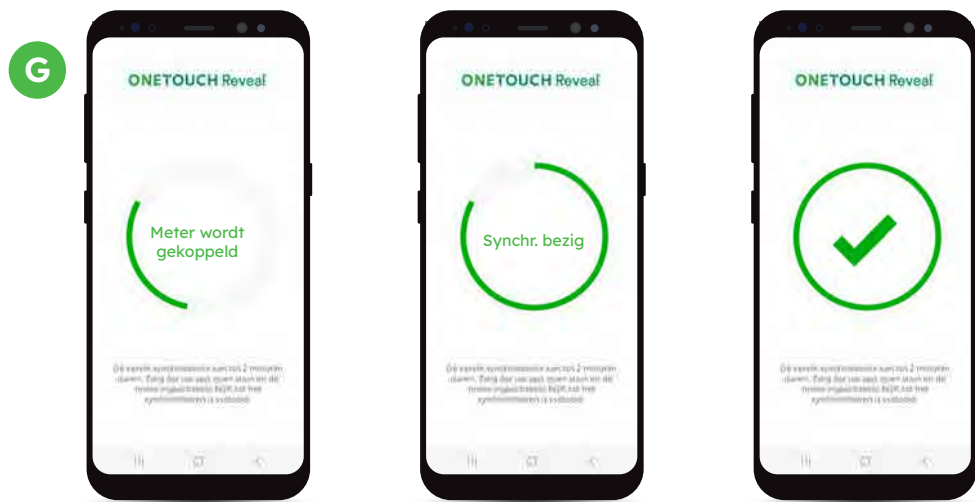

En, klaar!
U kunt nu uw gegevens
synchroniseren.







STAP 4

Deel uw vooruitgang met uw professionele zorgverlener

Optie 1:

Uw data automatisch en eenvoudig delen via de kliniekcode van uw professionele zorgverlener.*

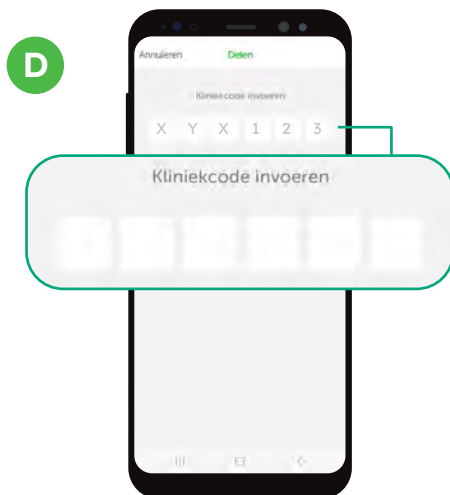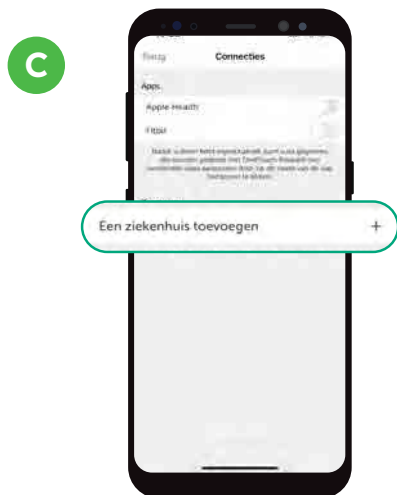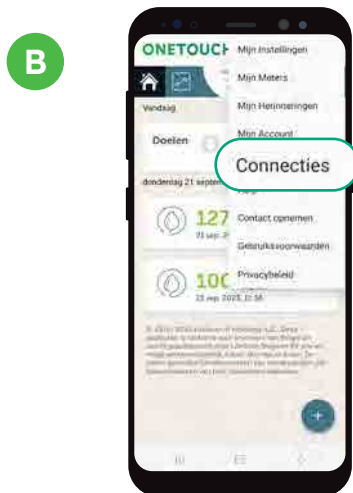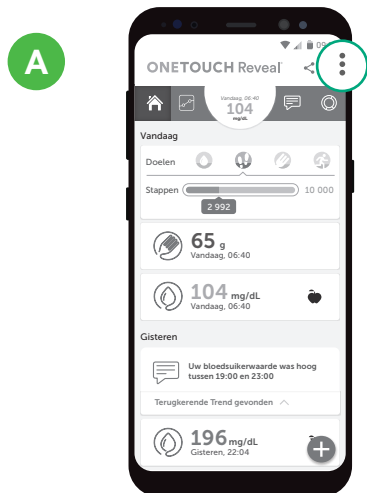


*U krijgt de kliniekcode van uw arts of een lid van uw zorgteam. Eenmaal ingevoerd in uw OneTouch Reveal® mobiele app, met uw toestemming, kunt u met deze code automatisch uw gezondheidsgegevens delen met uw medisch team via een beveiligde cloudverbinding. Om uw gegevens te delen moet uw OneTouch® meter met uw OneTouch Reveal® account geconnecteerd zijn.



Optie 2:

Een rapport met uw resultaten afdrucken of versturen per e-mail.**

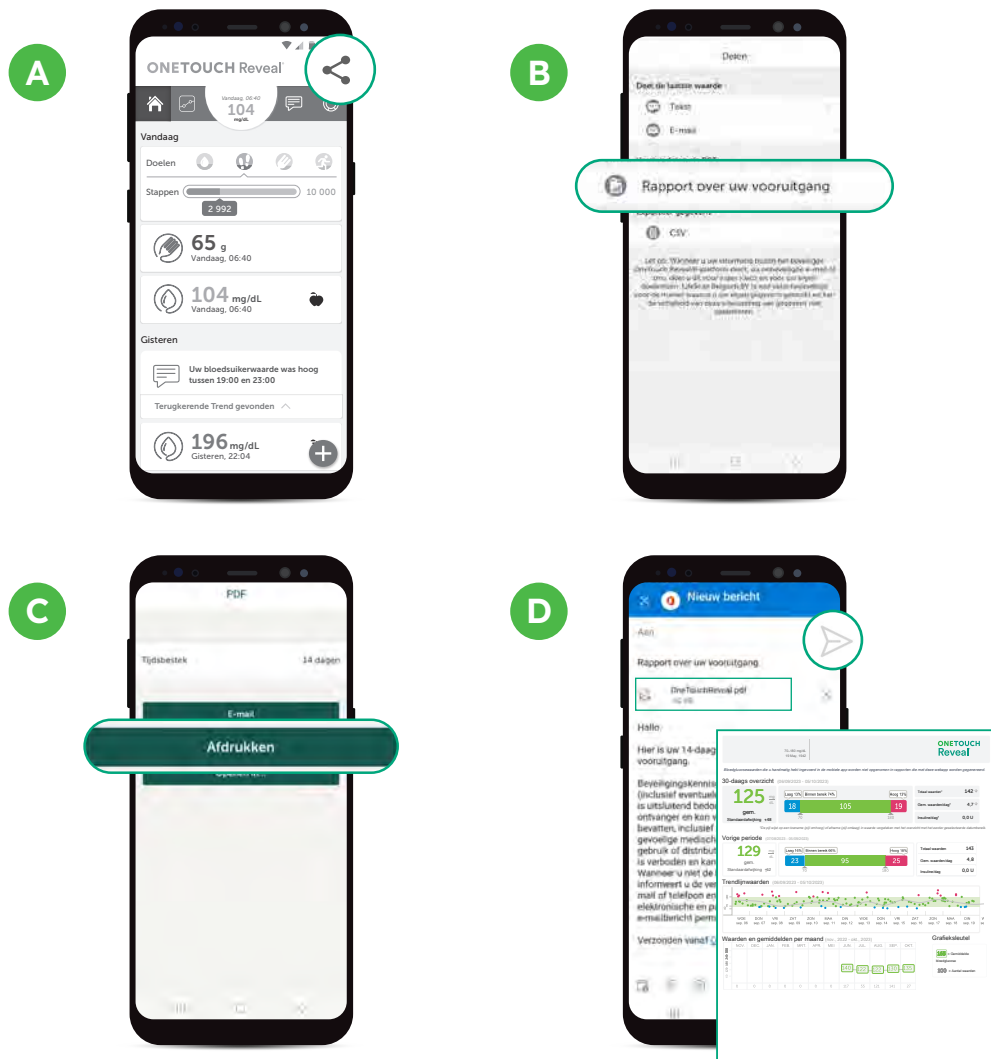

** Als u dat wilt, kunt u een rapport met uw recentste gezondheidsgegevens afdrucken of delen via e-mail. Dit rapport wordt gegenereerd vanuit uw mobiele OneTouch Reveal® app in PDF-formaat. Het enige dat u hoeft te doen, is het afdrucken of per e-mail naar uw medisch team sturen door op de link van de e-mailtoepassing te klikken die op uw smartphone is geconfigureerd.



De app installeren en configureren op een iOS smartphone

STAP 1

Download de OneTouch Reveal® mobiele app




Hebt u een Android smartphone?
Ga dan naar pagina 4 voor de configuratie

A




Tik op het App store icoon op uw Apple toestel

B

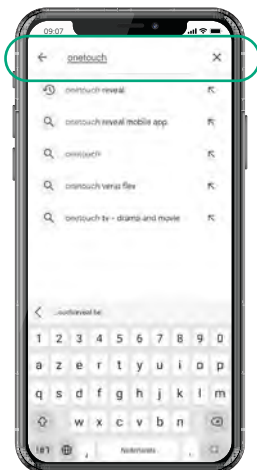


C

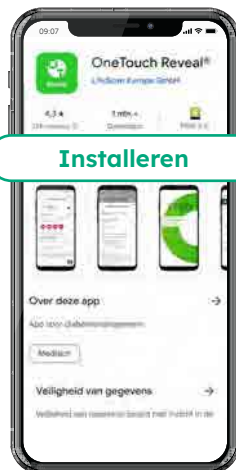

D



E

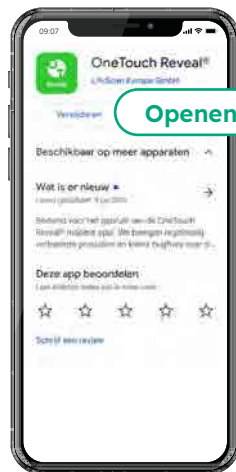




STAP 2


Een OneTouch Reveal account creëren, en de verplichte informatie aanvullen :




U bent vrij om te accepteren of te weigeren, maar om het meeste uit de app te halen, raden we aan om de optie **“TOESTAAN”** te selecteren. De app zal u nu notificaties kunnen sturen.

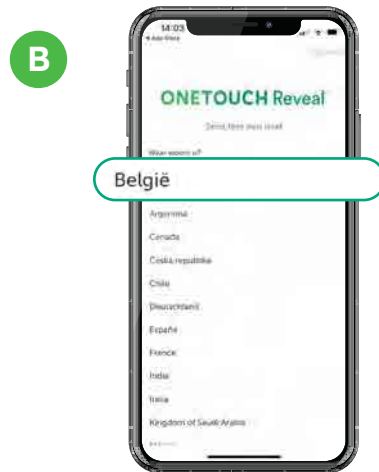

Kies **“België”** als uw land

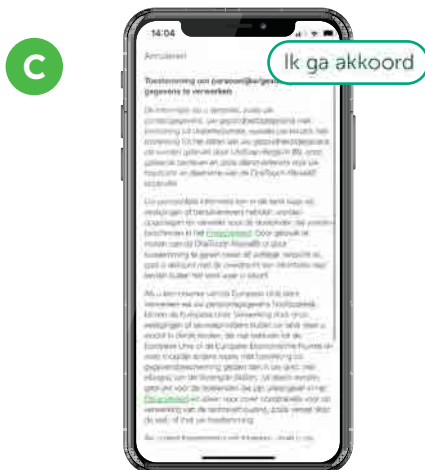

De **“Toestemming voor de verwerking van persoonlijke/ gevoelige gegevens”** aanvaarden

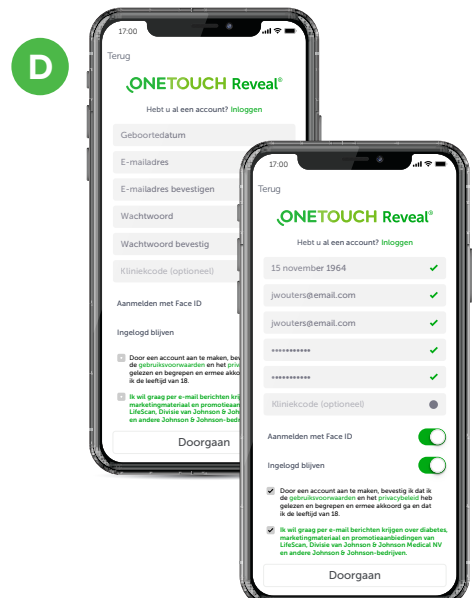



STAP 3

Uw OneTouch® meter met de OneTouch Reveal® app connecteren via Bluetooth

i BELANGRIJK

Zorg ervoor dat de Bluetooth® functie geactiveerd is zowel op de meter als uw smartphone



Bluetooth® activeren op uw meter

Voor de OneTouch Reflect® meters:

- Zet de meter aan door “OK” ingedrukt te houden
- Ga naar het menu “Instellingen” en kies Bluetooth®
- Selecteer “Aan” en duw op “OK”
- Ga terug naar het beginscherm met de knop ↶
- Het symbool  is nu zichtbaar op het scherm van uw meter in de rechterbovenhoek

Voor de OneTouch Select Plus Flex® meter

- Zet de meter aan door “OK” ingedrukt te houden
- Houd de knoppen “OK” en ^ ingedrukt
- Het  symbool is zichtbaar op het meterscherm

A



B



C



D





E



F



G



En, klaar!
U kunt nu uw gegevens
synchroniseren.





STAP 4

Deel uw vooruitgang met uw professionele zorgverlener

Optie 1 :

De kliniekcode van uw professionele zorgverlener gebruiken om uw gegevens eenvoudig en automatisch te delen

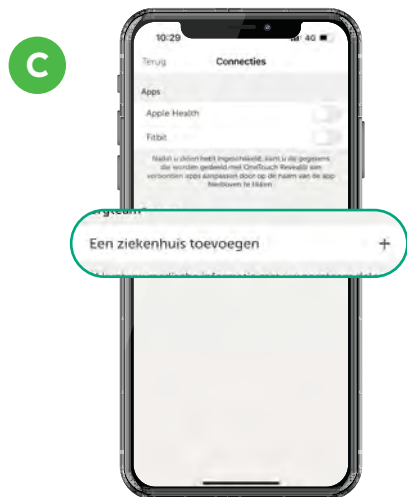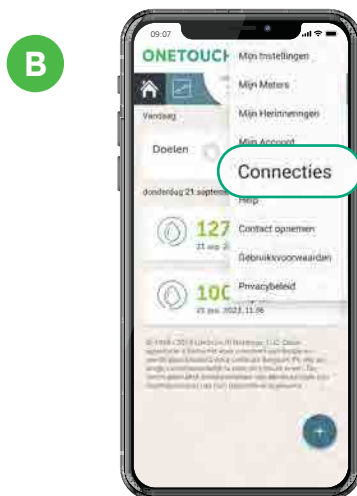


*U krijgt de kliniekcode van uw arts of een lid van uw zorgteam. Eenmaal ingevoerd in uw OneTouch Reveal® mobiele app, met uw toestemming, kunt u met deze code automatisch uw gezondheidsgegevens delen met uw medisch team via een beveiligde cloudverbinding. Om uw gegevens te delen moet uw OneTouch® meter met uw OneTouch Reveal® account geconnecteerd zijn.



Optie 2:

Een rapport met uw resultaten afdrukken of versturen per e-mail.**

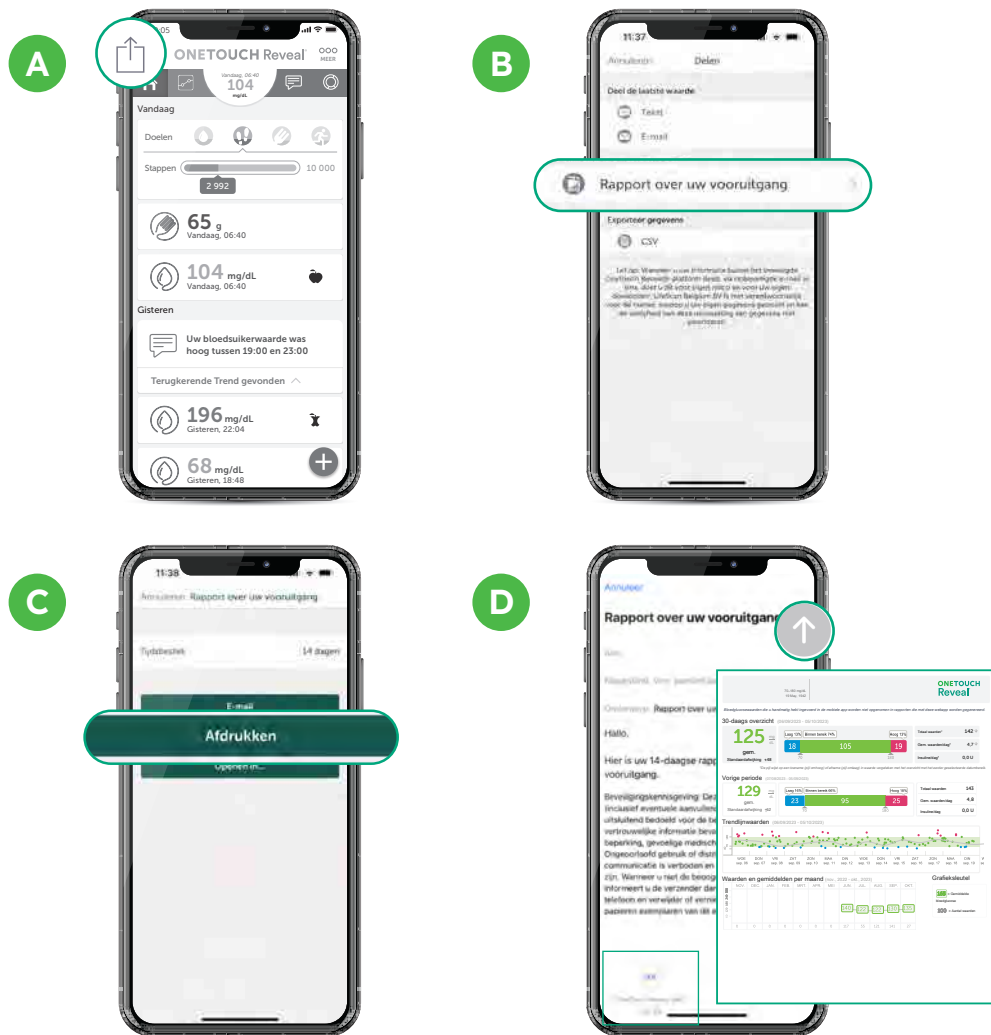

** Als u dat wilt, kunt u een rapport met uw recentste gezondheidsgegevens afdrukken of delen via e-mail. Dit rapport wordt gegenereerd vanuit uw mobiele ONETOUCH Reveal® app in PDF-formaat. Het enige dat u hoeft te doen, is het afdrukken of per e-mail naar uw medisch team sturen door op de link van de e-mailtoepassing te klikken die op uw smartphone is geconfigureerd.



Kliniekcode in te vullen door uw
professionele zorgverlener*

Voor al uw vragen over de OneTouch Reveal® mobiele app of uw
OneTouch® meter kunt u terecht bij de OneTouch® Klantendienst



www.OneTouch.be



contact@OneTouch.be



0800 15325 (gratis)

maandag tot vrijdag van 8h tot 17h

* Via de kliniekcode kan uw professionele zorgverlener uw gegevens raadplegen

© 2022-2023 LifeScan IP Holdings, LLC – BE-DMV-2300007

ONETOUCH®